


## Procédure de prélèvement DG29

### Mise en garde


Utiliser une aiguille neuve et un tube neuf pour chaque animal prélevé. Demander une assistance médicale appropriée si vous vous coupez ou piquez en effectuant le prélèvement. Tenir le matériel de prélèvement hors de la portée des enfants.

### Instructions

1. Assembler l'aiguille au porte aiguille en retirant le recouvrement de plastique transparent de l'aiguille et en la vissant au porte aiguille,

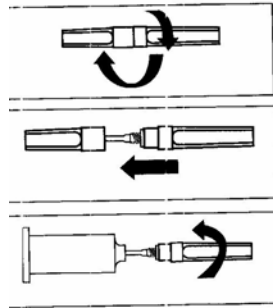

2. Localiser la veine caudale ou jugulaire de l'animal,
3. Désinfecter l'endroit de prélèvement à l'aide d'un tampon alcoolisé,
4. Retirer le protecteur de plastique qui recouvre l'aiguille,
5. Insérer l'aiguille dans la veine,
6. Insérer le tube dans le porte aiguille et pousser à fond, ce qui permet au sang d'entrer dans le tube,

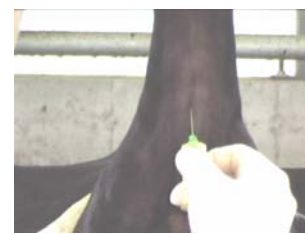

7. Remplir le tube jusqu'à ce que le sang cesse d'y entrer, en cas de difficulté à prélever sachez qu'il n'est pas nécessaire de remplir le tube, un fond de tube est généralement suffisant,
8. Si le sang n'entre pas dans le tube, repositionnez l'aiguille, mais assurez-vous de retirer préalablement le tube à vide du porte aiguille afin de conserver son vide. Si le vide est enlevé du tube il devient impossible de faire le prélèvement à partir de ce dernier et il vous faut changer de tube,
9. Retirer l'aiguille de l'animal et replacer les protecteurs de plastiques sur l'aiguille avant de disposer dans un contenant approprié,
10. Incrire immédiatement sur le tube, le numéro d'identification de l'animal.